

GUIDA DI TORQUE

TIPOLOGIA VITI DI RITENZIONE O ABUTMENT		TORQUE (Ncm)
Vite Tappo		Manuale*
Vite di Ritenzione		Manuale*
Abutment di guarigione FlatOne®		Manuale*
Abutment Provvisorio (Vite di ritenzione)		20 Ncm
Transfer d'Impronta (Vite corta)		10 Ncm
Transfer d'Impronta (Vite lunga) (Transfer / Abutment)		Manuale*
Flat One® Vite per Presa d'Impronta		Manuale*
Abutment diritto e Angolato (Vite di ritenzione o Vite di ritenzione clinica)		30 Ncm
FlatOne® Abutment		35 Ncm
FlatOne® Vite di Ritenzione		20 Ncm
Abutment Cilindrico (Vite di ritenzione o Vite di ritenzione clinica)		35 Ncm
Abutment Un-Pezzo		35 Ncm
Abutment Locator®		30 Ncm
Abutment a Palla		30 Ncm

*Fissato e serrato manualmente (5-10Ncm).