


Bone Profiler Kit

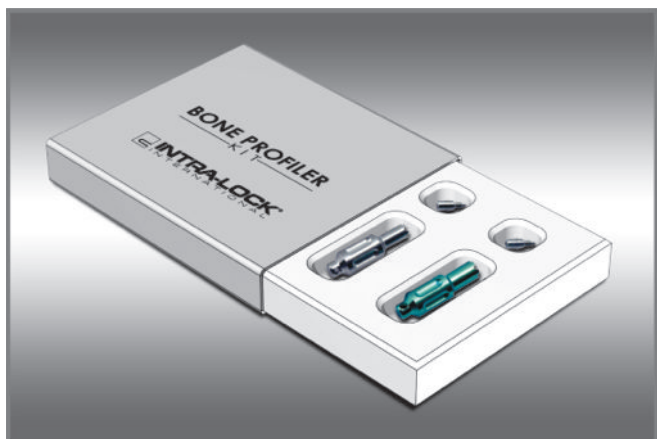


I Bone Profilers di Intra-Lock sono progettati per la rimozione manuale dell'osso crestale che potrebbe crescere intorno alla piattaforma dell'impianto durante la fase di guarigione.

I Bone Profilers vengono posizionati correttamente grazie all'utilizzo delle corrispondenti viti di allineamento, permettendo così la rimozione di tutto l'osso in eccesso senza modificare la precisione della superficie implantare. Questa procedura assicura un accurato posizionamento dei componenti restaurative.


Il Bone Profile Kit, include tre profilatori ossei e le viti di allineamento corrispondenti. Una per la piattaforma SQ, l'altra per quella ST e WD.



1: Parte superiore dell'impianto con l'eccesso di crescita ossea.

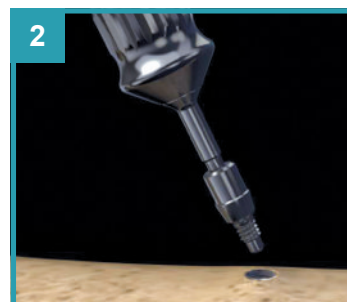

2: Le viti di allineamento sono posizionate e serrate con cacciavite manuale DS o DL.

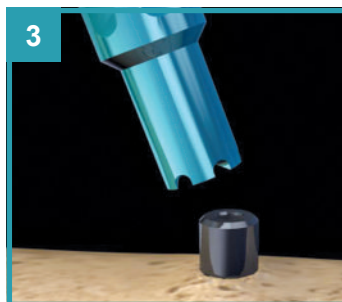

3: Il Bone Profiler viene posizionato sulla vite di allineamento



4: Viene ruotato fino a completa rimozione dell'osso in eccesso.



5: I detriti ossei sono visibili nelle scanalature del Bone Profiler.



6: Piattaforma implantare libera dall'eccesso di osso.

CODICE	DESCRIZIONE PRODOTTO
BPK.....	Bone Profiler Kit

Il Profiler Kit Contiene:

- BPSQ.....SQ Bone Profiler**
- BPAPSQSQ Alignment Post**
- BPSST Bone Profiler**
- BPWWD Bone Profiler**
- BPAPST & WD Alignment Post (x2)**

La vite di allineamento BPAP è utilizzata con entrambe le interfacce Standard e Wide (due incluse nel Kit). I Bone Profilers e le corrispondenti viti di allineamento possono essere ordinate separatamente

